

⚠ Póngase en contacto con el servicio técnico

Presencia y tranquilización	
Indicaciones en el indicador 	Presencia de la enfermera en la habitación n.º 1
	Tranquilización (silenciar el sonido) pulsando el botón de la consola principal.

Llamadas de enfermería

Llamadas del paciente	
	Llamada de la habitación n.º 1 desde el bloque de puerta.
	Llamada desde la habitación n.º 1, Cama 1
	Llamada desde la habitación n.º 2, Cama 2
	Llamada desde cuarto de baño: tirando del tirador del cuarto de baño de la habitación.


Solicitud de ayuda de la enfermera en la habitación n.º 1 	Presencia de la enfermera Solicitud de ayuda de la enfermera
--	---

Urgencia de cuarto de baño en la habitación n.º 1 	Presencia de la enfermera Solicitud de ayuda
--	---

Llamada de urgencia extrema (código azul) en la habitación n.º 1 	Presencia de la enfermera Solicitud de urgencia extrema
---	--

Llamada de urgencia extrema (código azul) en el cuarto de baño de la habitación n.º 1 	Presencia de la enfermera Solicitud de urgencia extrema
--	--

Alarma biomédica en la habitación n.º 1 	Alarma de fuga, Puerta n.º 1
--	---

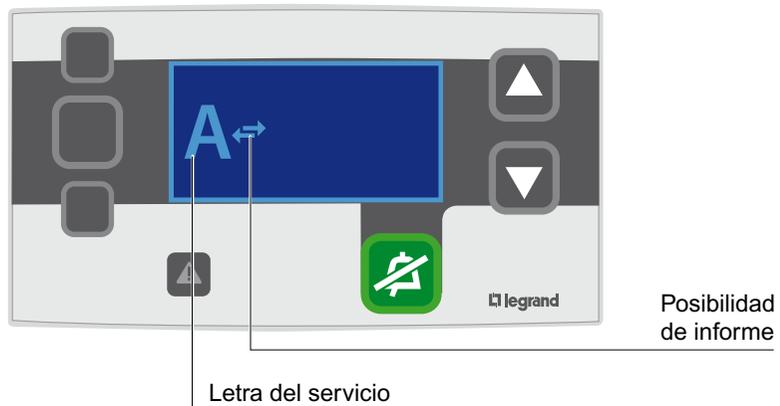

Nota de los servicios	
Letra	Nombre del servicio
<input type="text"/>

Llamadas de enfermería

Activación del registro de servicio (Nueva versión 15W06)

Consola principal con registro activado



Pulse simultáneamente las teclas + de la consola.

Consola que configura el registro



Elija el servicio del que se debe realizar el registro con la tecla

Validación del registro




Valide el registro pulsando simultáneamente las teclas + de la consola.

Registro de la zona A en B activo



Desactivación del registro de servicio (Nueva versión 15W06)

Registro de la zona A en B activo

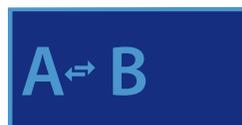

Validación del registro



Pulse simultáneamente las teclas + de la consola.

Consola que configura el registro




Elija el servicio "vacío" para anular el registro con la tecla

Consola principal con registro activado



Pulse simultáneamente las teclas + de la consola.

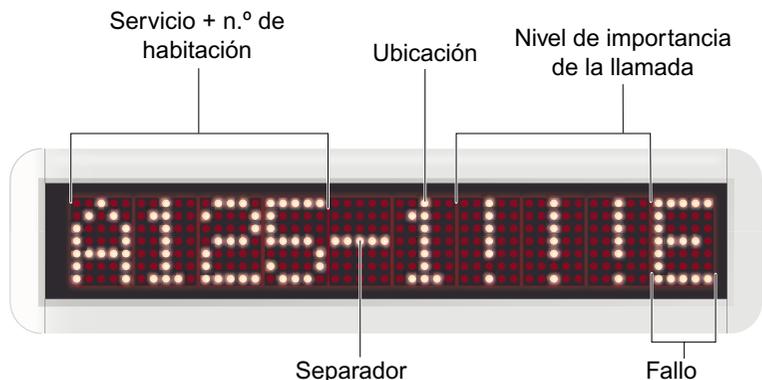

Presencia y tranquilización

Indicaciones en el indicador

	Presencia de la enfermera en la habitación n.º 125.
	Tranquilización (silenciar el sonido) pulsando el botón de la consola principal.

Llamadas de enfermería

Llamadas de paciente

	Llamada de la habitación n.º 125 desde el bloque de puerta.	
	Llamada desde la habitación n.º 125, cama 1.	
	Llamada desde la habitación n.º 125, cama 2.	
	Llamada desde cuarto de baño: tirando del tirador del cuarto de baño de la habitación.	

Solicitud de ayuda de la enfermera en la habitación n.º 125

	Presencia de la enfermera Solicitud de ayuda de la enfermera	
--	---	--

Urgencia de cuarto de baño en la habitación n.º 125

	Presencia de la enfermera Solicitud de ayuda	
--	---	--


Código azul en la habitación n.º 125

	Presencia de la enfermera Solicitud de urgencia extrema	
--	--	--

Alarma biomédica en la habitación n.º 125



Alarma de fuga, Puerta n.º 1

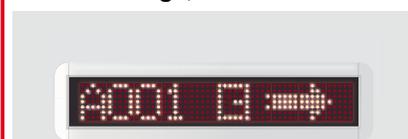

Código azul en el cuarto de baño de la habitación n.º 125

	Presencia de la enfermera Solicitud de urgencia extrema	
--	--	--

Indicaciones en el indicador	Indicaciones sonoras		Tipos de timbre	Descripción
	del indicador	de la consola principal		
				Llamada de un paciente
				Llamada desde cuarto de baño
				Llamada de urgencia
				Urgencia extrema

Ejemplos de mensajes de error

	Fallo en la habitación n.º 125.
	Presencia de la enfermera en la habitación n.º 125 + fallo del sistema.
	Llamada desde la habitación n.º 125, cama 1 + fallo del sistema
	Alarma de deambulación segura, Puerta n.º 1 + fallo del sistema

Servicio de mantenimiento

Tel. 1

Tel. 2



Presencia y tranquilización	
Indicaciones en el visor	
	Presencia de la enfermera en la habitación que ha efectuado la llamada.

Llamadas de enfermería	
Llamadas de paciente	
	Llamada de la habitación n.º 125 desde el bloque de puerta.
	Llamada desde la habitación n.º 125, cama 1.
	Llamada desde cuarto de baño: tirando del tirador del cuarto de baño de la habitación.
Alarma biomédica en la habitación n.º 125	
<i>Parpadeo lento</i>	Llamada desde una habitación o sala específica durante el fin de ciclo de un aparato médico.
Alarma de fuga, Puerta n.º 1	
	La alarma no está conectada a los pasillos (estos no se encienden si se activa la alarma).

Solicitud de ayuda de la enfermera en la habitación n.º 125	
<i>Parpadeo lento</i>	Presencia de la enfermera Solicitud de ayuda de la enfermera
Urgencia de cuarto de baño en la habitación n.º 125	
<i>Parpadeo lento</i>	Presencia de la enfermera Solicitud de ayuda
Código azul en la habitación n.º 125	
<i>Parpadeo rápido</i>	Presencia de la enfermera Solicitud de urgencia extrema
Código azul en el cuarto de baño de la habitación n.º 125	
<i>Parpadeo rápido</i>	Presencia de la enfermera Solicitud de urgencia extrema
Fallos	
<i>Encendido cíclico</i>	Fallo de la instalación

PRIORIDAD				
TIPO DE LLAMADA	CONTROL	VISUALIZACIÓN EN VISOR DE PASILLO	VISUALIZACIÓN EN LA CONSOLA Y EL BLOQUE DE PUERTA CON PANTALLA	
Llamada de urgencia extrema desde cuarto de baño (código azul)		<p>Parpadeo rápido</p>	<p>001-W</p> <p>BIP BIP BIP</p>	
Llamada de urgencia extrema desde habitación (código azul)		<p>Parpadeo rápido</p>	<p>001</p> <p>BIP BIP BIP</p>	
Llamada de urgencia (ayuda) desde cuarto de baño		<p>Parpadeo lento</p>	<p>001-W</p> <p>BIP BIP</p>	
Llamada de urgencia (ayuda) desde habitación		<p>Parpadeo lento</p>	<p>001</p> <p>BIP BIP</p>	
Alarma de fuga		<p>Parpadeo lento</p>	<p>001</p> <p>BIP BIP</p>	
Alarma biomédica		<p>Parpadeo lento</p>	<p>001-B</p> <p>BIP BIP</p>	
Llamada desde cuarto de baño			<p>001-W</p> <p>BIP</p>	
Llamada desde habitación			<p>001</p> <p>BIP</p>	